

## Levering

### 1 BREEZHALER® og inhalationskapsler

- Din inhalator og medicin. Du kan finde anvisninger i, hvordan du bruger dem, i den medfølgende æske.



### 2 Propeller Sensor til Breezhaler®


- Sensoren kan tilsluttes din BREEZHALER®
- Sensoren registrerer, hvornår du bruger din BREEZHALER®
- Sensoren sender information til Propeller-mobilappen



### 3 Adgang til Propeller-mobilappen

Du kan bruge Propeller-mobilappen til at:

- Indstil påmindelser, så din Propeller Sensor til BREEZHALER® giver dig besked, når det er tid til at tage en dosis.
- Spore dine triggers og lære mere om faktorer, der kan forværre din sygdom
- Udskrive en rapport, der indeholder information om brugen af din inhalator, som du kan dele med din læge

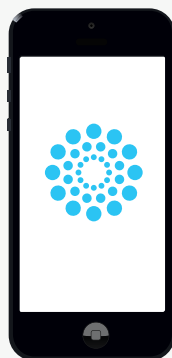

## Receptfornyelse

- Din næste BREEZHALER®-receptfornyelse inkluderer ikke en ny Propeller Sensor til BREEZHALER®.
- Denne Propeller Sensor har en levetid på et år fra aktiveringsdatoen. Propeller-mobilappen vil give dig besked, når det er tid til at bestille en ny sensor.
- Tjek Propeller-mobilappen for anvisninger i, hvordan du overfører sensordata fra din gamle BREEZHALER® til din nye sensor.

Husk, at Propeller Sensor og appen er værktøjer, som kan hjælpe dig med at behandle din astma. Sørg altid for at følge producentens retningslinjer, når du administrerer din BREEZHALER®.


## Opsætningsvejledning

⚠ Propeller Sensor til BREEZHALER® fungerer ikke uden Propeller-mobilappen. For at indstille sensoren, skal du først downloade Propeller-appen på din smartphone og følge anvisningerne i appen.

### Trin 1: Download Propeller-mobilappen

Sådan gør du:

- Tag din smartphone eller tablet frem
- Åbn "App Store"-appen (på din iPhone) eller "Google Play Store"-appen (på din Android-telefon)
- Søg efter "Propeller"
- Tap eller klik for at downloade og installere appen

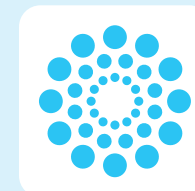

### Trin 2: Åbn appen og følg anvisningerne i appen for at:

- Oprette en konto, der giver dig bedre muligheder for at bruge din sensor til behandling af dine symptomer
- Aktivér din Propeller Sensor til BREEZHALER®, så den kan registrere, hvordan du bruger din inhalator.
- Tilslut din Propeller Sensor til din BREEZHALER®.

### Har du brug for hjælp til opsætning?

- Fortsæt med at tage dine BREEZHALER®-doser iht. din læges anvisninger, også selvom Propeller Sensor til Breezhaler® ikke er tilsluttet.
- Send en e-mail til vores supportteam på [help@propellerhealth.com](mailto:help@propellerhealth.com) eller besøg [www.propellerhealth.com/call](http://www.propellerhealth.com/call) for at få vores gratistelefonnummer.

