

Qué incluye

1 BREEZHALER® y cápsulas de inhalación

- Su inhalador y medicamento. Encontrará instrucciones sobre cómo utilizarlos en la caja en la que se envían.



2 Sensor Propeller para BREEZHALER®


- Se conecta a su BREEZHALER®
- Registra cada vez que utiliza su inhalador BREEZHALER®
- Envía información a la aplicación para móviles de Propeller



3 Acceda a la aplicación para móviles de Propeller

Puede utilizar la aplicación para móviles de Propeller para:

- Programar recordatorios de modo que su sensor Propeller para BREEZHALER® suene cada vez que le toque realizar una toma
- Llevar un seguimiento de sus desencadenantes y aprender sobre los factores que pueden provocar los brotes de su enfermedad
- Imprimir un informe sobre el uso de su inhalador, que puede compartir con su médico

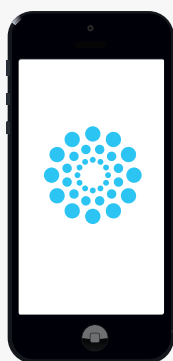

Recambios (con receta)

- Su próximo recambio de BREEZHALER® no incluirá un sensor Propeller nuevo para BREEZHALER®.
- Este sensor Propeller tendrá una duración de un año desde la fecha de activación. La aplicación para móviles de Propeller le recordará cuándo tiene que solicitar un sensor nuevo.
- Entre en la aplicación para móviles de Propeller para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el sensor de su inhalador BREEZHALER® antiguo al nuevo.

Recuerde que el sensor y la aplicación de Propeller son herramientas creadas para ayudarle con la gestión de su asma. Siga siempre las directrices del fabricante cuando utilice su inhalador BREEZHALER®.

Instrucciones de configuración


⚠ El sensor Propeller para BREEZHALER® no funcionará sin la aplicación para móviles de Propeller. Para configurar su sensor, descargue primero la aplicación de Propeller en su teléfono móvil y siga las instrucciones que aparecen en la aplicación.

Paso 1: Descargue la aplicación para móviles de Propeller



A continuación le indicamos como hacerlo:

- **Coja** su teléfono móvil o tableta
- **Abra** la aplicación de App Store (en su iPhone) o Google Play Store (en su teléfono Android)
- **Busque** «Propeller»
- **Pulse** para descargar e instalar la aplicación

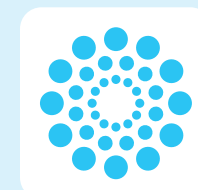

Paso 2: Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en la misma para:

- **Crear una cuenta** que le permita utilizar el sensor para gestionar mejor sus síntomas
- **Activar su sensor Propeller para BREEZHALER®** y así poder mantener un seguimiento de su uso del inhalador
- **Conectar su sensor Propeller** a su inhalador BREEZHALER®

¿Necesita ayuda con la configuración?

- **Siga realizando sus tomas de BREEZHALER® según lo pautado**, aunque el sensor Propeller para BREEZHALER® no esté conectado.
- **Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente** a través de help@propellerhealth.com o visite www.propellerhealth.com/call para conocer nuestro número de teléfono gratuito.

