

Pakkauksen sisältö

1 BREEZHALER®-inhalaattori ja inhalaatiokapselit

- Inhalaattorisi ja lääkkeesi. Löydät käyttöohjeet niiden pakkauksesta.



2 Propeller-sensori BREEZHALER®-inhalaattorille


- Kiinnittyy BREEZHALER®-inhalaattoriisi
- Seuraa BREEZHALER®-inhalaattorin käyttöäsi
- Lähettää tietoja Propeller-mobiilisovellukseen



3 Propeller-mobiilisovelluksen käyttöoikeus

Propeller-mobiilisovelluksella voit:

- Asettaa muistutuksia, jotta BREEZHALER®-inhalaattorin Propeller-sensorisi hälyttää, kun on aika ottaa lääkeannos
- Seurata sairautesi laukaisevia tekijöitä ja oppia tunnistamaan syitä sen puhkeamiseen
- Tulostaa inhalaattorin käyttöäsi koskevan raportin, jonka voit antaa lääkärillesi

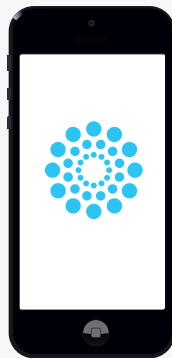

Reseptin uusiminen

- Seuraavan uuden BREEZHALER®-inhalaattorireseptisi mukana ei tule uutta Propeller-sensoria BREEZHALER®-inhalaattorille.
- Tämä Propeller-sensori kestää vuoden aktivointipäivästä laskettuna. Propeller-mobiilisovellus muistuttaa sinua, kun on aika hankkia uusi sensoria.
- Tarkista Propeller-mobiilisovelluksesta ohjeet siihen, miten voit siirtää sensorisi vanhasta BREEZHALER®-inhalaattoristasi uuteen inhalaattoriin.

Muistathan, että Propeller-sensori ja -sovellus ovat työkaluja, jotka auttavat sinua astmasi hallinnassa. Varmista aina, että noudatat valmistajan ohjeita, kun käytät BREEZHALER®-inhalaattoriasi.

Näin aloitat käytön




Propeller-sensori BREEZHALER®-inhalaattorille ei toimi ilman Propeller-mobiilisovellusta. Jotta voit valmistella sensorin käyttöä varten, sinun on ensin ladattava Propeller-sovellus älypuhelimellesi ja seurattava sovelluksen ohjeita.

Vaihe 1: Lataa Propeller-mobiilisovellus



Näin lataat sovelluksen:

- Ota esiin älypuhelimellesi tai tablettisi
- Avaa "App Store" -sovellus (iPhone-puhelimellesi) tai "Google Play Kauppa" -sovellus (Android-puhelimellesi)
- Etsi sovellusta "Propeller"
- Napauta tai klikkaa ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen

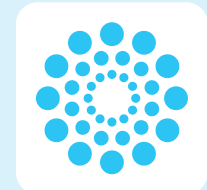

Vaihe 2: Avaa sovellus ja tee sovelluksen ohjeiden mukaisesti seuraavat toimet:

- Luo tili, jonka avulla voit käyttää sensoria ja hallita oireitasi paremmin
- Aktivoi Propeller-sensorisi BREEZHALER®-inhalaattorille, jotta se voi seurata, miten käytät inhalaattoriasi
- Kiinnitä Propeller-sensorisi BREEZHALER®-inhalaattoriisi

Tarvitsetko apua asentamisessa tai käyttöönotossa?

- Jatka BREEZHALER®-annostesi ottamista lääkärin ohjeiden mukaisesti, vaikka Propeller-sensoria BREEZHALER®-inhalaattorille ei olisikaan kiinnitetty.
- Ota tukitiimiimme yhteyttä osoitteella help@propellerhealth.com tai katso maksuttoman puhelinpalvelumme numero täältä. www.propellerhealth.com/call.

