

Cosa è compreso

1 BREEZHALER® e capsule per inalazione

- Il tuo inalatore e il farmaco. Troverai istruzioni su come usarli nella scatola in cui sono contenuti.



2 Sensore Propeller per BREEZHALER®

- Si collega al tuo BREEZHALER®
- Tiene traccia di quando usi BREEZHALER®
- Invia informazioni all'app mobile Propeller



3 Accesso all'app mobile Propeller

Puoi usare l'app mobile Propeller per:

- Impostare promemoria in modo che il tuo sensore Propeller per BREEZHALER® suoni quando è ora di prendere una dose
- Tenere traccia dei fattori di rischio e scoprire quelli che possono comportare una riacutizzazione della malattia
- Stampare un rapporto su come usi l'inalatore da condividere col tuo medico



Ricarica con prescrizione

- La tua prossima ricarica con prescrizione BREEZHALER® non avrà in dotazione un nuovo sensore Propeller per BREEZHALER®.
- Questo sensore Propeller durerà per un anno dalla data di attivazione. L'App mobile Propeller ti ricorderà quando è arrivato il momento di procurarti un nuovo Sensore.
- Controlla l'app mobile Propeller per istruzioni su come spostare il sensore da un vecchio BREEZHALER® a uno nuovo.

Ricorda che il sensore Propeller e l'app sono strumenti che ti aiutano a gestire l'asma. Assicurati di seguire sempre le linee guida del produttore durante la somministrazione di BREEZHALER®.

Istruzioni per l'impostazione

 Il sensore Propeller per BREEZHALER® non funzionerà senza l'app mobile Propeller. Per impostare il sensore occorre prima scaricare l'app Propeller sullo smartphone e seguire le istruzioni indicate nell'app stessa.

Passo 1: Scaricare l'app mobile Propeller



Ecco come farlo:

- Prendi il tuo smartphone o tablet
- Apri l'app "App Store" (sul tuo iPhone) o l'app "Google Play Store" (sul tuo telefono Android)
- Cerca "Propeller"
- Tocca o fai clic per scaricare e installare l'app



Passo 2: Apri l'app e segui le istruzioni riportate per:

- Creare un account che ti consente di usare il sensore per una migliore gestione dei tuoi sintomi
- Attivare il tuo sensore Propeller per BREEZHALER® per tenere traccia di come usi l'inalatore
- Collegare il sensore Propeller al tuo BREEZHALER®

Ti serve aiuto con l'impostazione?

- Continua a prendere le dosi BREEZHALER® secondo prescrizione, anche se il sensore Propeller per BREEZHALER® non è collegato.
- Contatta il nostro team di assistenza mandando un'email all'indirizzo help@propellerhealth.com o visitando la pagina www.propellerhealth.com/call per chiamare il nostro numero verde.

