

Inkludert

1 BREEZHALER® og inhalasjonskapsler

- Inhalator og legemiddel. Du finner instruksjoner for hvordan du bruker dem i esken de kom i.



2 Propeller-sensor til BREEZHALER®


- Kobles til din BREEZHALER®
- Sporer bruken din av BREEZHALER®
- Sender informasjon til Propellers mobilapp



3 Tilgang til Propellers mobilapp

Du kan bruke Propellers mobilapp til å:

- Sette opp påminnelser slik at Propeller-sensoren til BREEZHALER® varsler når det er på tide å ta en dose
- Spore triggerne dine og lære om faktorer som kan gjøre at sykdommen din blusser opp
- Skrive ut en rapport over inhalatorbruken din, så du kan dele denne med legen

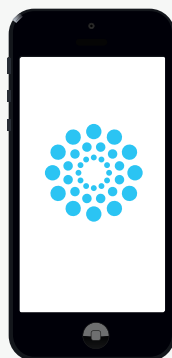

Ny resept

- Din neste resept på BREEZHALER® vil ikke komme med en ny Propeller-sensor til BREEZHALER®.
- Denne Propeller-sensoren vil vare i ett år fra den dagen den aktiveres. Propellers mobilapp vil minne deg på det når det er på tide å skaffe en ny sensor.
- Se Propellers mobilapp for instruksjoner om å flytte sensoren fra din gamle BREEZHALER® til din nye.

Husk at Propeller-sensoren og -appen er verktøy til å hjelpe deg med å håndtere astma. Husk å alltid følge produsentens retningslinjer når du bruker BREEZHALER®.


Instruksjoner for oppsett

⚠ Propeller-sensoren til BREEZHALER® fungerer ikke uten Propellers mobilapp. For å sette opp sensoren må du først laste ned Propeller-appen til smarttelefonen din og følge instruksjonene i appen.

Trinn 1: Last ned Propellers mobilapp

Slik gjør du det:

- **Ta frem** smarttelefonen eller nettbrettet
- **Åpne** «App Store»-appen (på iPhone) eller «Google Play Store»-appen (på Android-telefon)
- **Søk** etter «Propeller»
- **Trykk eller klikk** for å laste ned og installere appen

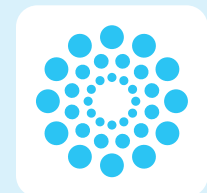

Trinn 2: Åpne appen og følg instruksjonene i appen for å:

- **Opprette en konto** som gjør at du kan bruke sensoren til å håndtere symptomene bedre
- **Aktivere din Propeller-sensor til BREEZHALER®** så den kan spore hvordan du bruker inhalatoren din
- **Koble din Propeller-sensor til din BREEZHALER®**

Trenger du hjelp til oppsett?

- **Fortsett å ta dine doser med BREEZHALER® som foreskrevet**, selv om ikke Propeller-sensoren til BREEZHALER® er tilkoblet.
- **Send e-post til support-teamet** på help@propellerhealth.com eller gå til www.propellerhealth.com/call for å finne gratis-nummeret vårt.

