

## O que está incluído

### 1 BREEZHALER® e cápsulas de inalação

- O inalador e a medicação. Encontra instruções sobre como utilizá-los na caixa em que são fornecidos.



### 2 Sensor Propeller para BREEZHALER®


- Liga-se ao seu BREEZHALER®
- Monitoriza quando utiliza o BREEZHALER®
- Envia informações para a aplicação móvel Propeller



### 3 Acesso à aplicação móvel Propeller

Pode utilizar a aplicação móvel Propeller para:

- Configurar lembretes para que o Sensor Propeller para BREEZHALER® soe quando for altura de tomar uma dose
- Monitorizar os fatores desencadeadores e saber mais sobre os fatores que podem fazer com que a doença avive
- Imprimir um relatório de utilização do inalador para partilhar com o seu médico

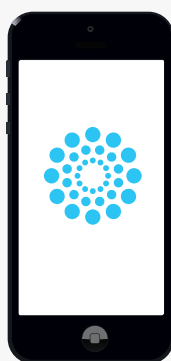

## Recarga com receita médica

- A próxima recarga com receita médica de BREEZHALER® não será fornecida com um novo Sensor Propeller para BREEZHALER®.
- Este sensor Propeller dura um ano a partir da data de ativação. A aplicação móvel Propeller irá lembrá-lo de quando for altura de obter um novo sensor.
- Consulte a aplicação móvel Propeller para obter instruções sobre como mudar o sensor do BREEZHALER® antigo para o novo.

Tenha em atenção que o sensor e a aplicação Propeller são ferramentas para ajudar no controlo da asma. Siga sempre as diretrizes do fabricante ao administrar o seu BREEZHALER®.

## Instruções de configuração


⚠ O Sensor Propeller para BREEZHALER® não funciona sem a aplicação móvel Propeller. Para configurar o sensor, primeiro deve transferir a aplicação Propeller para o smartphone e seguir as instruções na aplicação.

### 1.º passo: transferir a aplicação móvel Propeller



Eis como fazê-lo:

- **Segurar** no smartphone ou tablet
- **Abrir** a aplicação "App Store" (no iPhone) ou a aplicação "Google Play Store" (no telemóvel Android)
- **Procurar** "Propeller"
- **Tocar ou clicar** para transferir e instalar a aplicação

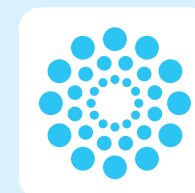

### 2.º passo: abrir a aplicação e seguir as instruções na aplicação para:

- **Criar uma conta** que lhe permite utilizar o sensor para controlar melhor os sintomas
- **Ativar o seu Sensor Propeller para BREEZHALER®** para que possa monitorizar a forma como utiliza o inalador
- **Ligar o seu Sensor Propeller** ao seu BREEZHALER®

### Necessita de ajuda com a configuração?

- **Continue a tomar as doses de BREEZHALER® conforme receitado**, mesmo que o Sensor Propeller para BREEZHALER® não esteja ligado.
- **Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente** em [help@propellerhealth.com](mailto:help@propellerhealth.com) ou visite [www.propellerhealth.com/call](http://www.propellerhealth.com/call) para obter o nosso número de telemóvel gratuito.

