

Vad som medföljer

1 BREEZHALER® och kapslar för inhalering

- Din inhalator och medicinering. Anvisningar om hur du använder dem finns på förpackningen som de kom i.



2 Propeller-sensor för BREEZHALER®


- Fästs på din BREEZHALER®
- Registrerar när du använder din BREEZHALER®
- Skickar information till Propeller-mobilappen



3 Åtkomst till Propeller-mobilappen

Du kan använda Propeller-mobilappen till att:

- Konfigurera påminnelser så att Propeller-sensorn för BREEZHALER® avger en ljudsignal när det är dags att ta en dos
- Spåra vad som utlöser symtom och lära dig mer om vilka faktorer som orsakar en försämring av din sjukdom
- Skriva ut en rapport om din användning av inhalatorn som du kan ta med och visa din läkare

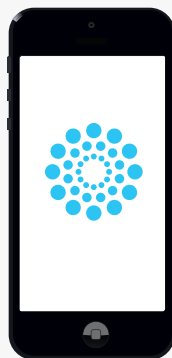

Förnya recept

- När du förnyar ditt recept för BREEZHALER® nästa gång kommer du inte att få en ny Propeller-sensor för BREEZHALER®.
- Den här Propeller-sensorn kan användas i ett år från aktiveringsdatumet. Propeller-mobilappen kommer att påminna dig när det är dags att skaffa en ny sensor.
- I Propellers mobilapp hittar du även anvisningar om hur du flyttar sensorn från din gamla BREEZHALER® till den nya.

Kom ihåg att Propeller-sensorn och appen är verktyg som hjälper dig hantera din astma. Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder din BREEZHALER®.

Konfigureringsanvisningar


⚠ Propeller-sensorn BREEZHALER® fungerar inte utan Propeller-mobilapp. Innan du konfigurerar sensorn måste du först ladda ner Propeller-mobilappen på din smartphone och följa anvisningarna i appen.

Steg 1: Ladda ner Propeller-mobilappen



Så här gör du:

- Ta fram din smartphone eller surfplatta
- Öppna appen "App Store" (om du har en iPhone) eller "Google Play Store" (om du har en Android-mobil)
- Sök efter "Propeller"
- Tryck eller klicka för att ladda ner och installera appen

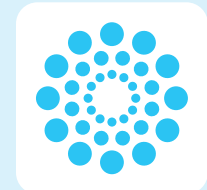

Steg 2: Öppna appen och följ anvisningarna för att göra följande:

- Skapa ett konto som låter dig använda sensorn för att hjälpa dig hantera dina symtom
- Aktivera Propeller-sensorn för BREEZHALER® så att den kan registrera hur du använder inhalatorn
- Fästa Propeller-sensorn på din BREEZHALER®

Behöver du hjälp med konfigureringen?

- Fortsätt ta BREEZHALER®-doserna som ordinerat, även om Propeller-sensorn för BREEZHALER® inte är monterad.
- Kontakta vårt supportteam på help@propellerhealth.com eller gå till www.propellerhealth.com/call där du hittar vårt gratisnummer.

